


Stahování dat z

CONTOUR (glukometr Contour Plus One)

POSTUP získání dat

POSTUP získání dat

- 1) v mobilní aplikaci Contour zvolte v levém horním rohu menu -> kliknete na *Moje péče* (viz obrázek 1)
- 2) v menu *Moje péče* zvolte "Zprávy" (viz obrázek 2)
- 3) vyexportujte zprávy: "Zpráva o hodnotách glukózy" + "Deník glukózy v krvi" (viz obrázek 3)
- 4) PDF odešlete na e-mail do ambulance viz instrukce níže

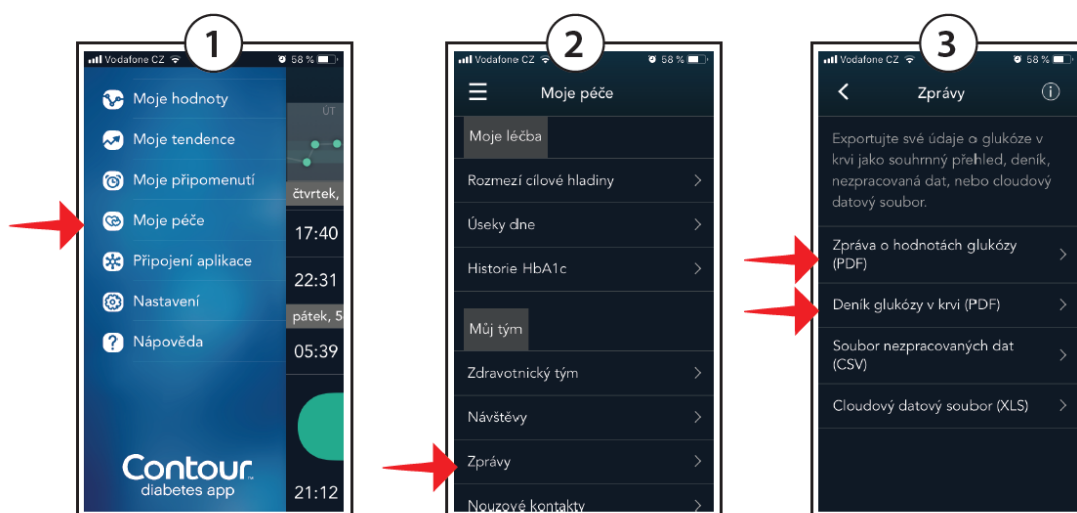

Odeslání stažených dat:

Soubor odešlete na email: info@mudrkoliba.cz

Email nazvěte: Stažený glukometr/senzor/pumpa

Do textu emailu napište kontaktní údaje:

Jméno a přímění

Email

Mobilní telefon